

BIOCREDIT COVID-19 Ag


SARS-CoV 2 Test Antigene

- » La prima commercializzazione della tecnologia Black Gold Particle nel mondo (alta sensibilità e specificità)
- » Sistema a due colori facile da usare (linea di controllo: rosso, linea di test: nero)
- » Tempo di test rapido (5 ~ 8 minuti)
- » Rilevazione semplice dell'antigene SARS-CoV2

Tecnologia di base Black Gold Particle



Tecnologia del coniugato oro-nero differenziato

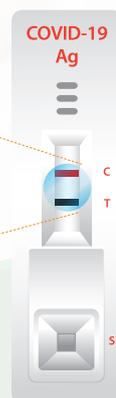

Sistema a doppio colore

Test in 8 minuti!



BIOCREDIT COVID-19 Ag kit test rapido

Destinazione d'uso	Rilevazione di antigeni SARS-CoV2
Confezione	20 Test a scatola
Storage	1 ~ 40°C
Tipo di campione	Rinofaringe / Rinofaringea
Scadenza	24 mesi dalla produzione
Tempo risultato	5~8 minuti

COVID-19 Test Diagnostico Rapido

PROCEDURA

Inserire il tampone con il campione e agitare per 5-10 volte

Rimuovere il tampone mentre si preme delicatamente la testa del tampone

Chiudere la provetta del diluente col tappo fornito

Capovolgere la provetta del diluente e strizzarla per mettere 3-4 gocce (90-150 µL) nel pozzetto

Leggere il risultato entro 5~8 minuti




INTERPRETAZIONE

NEGATIVO

POSITIVO

INVALIDO

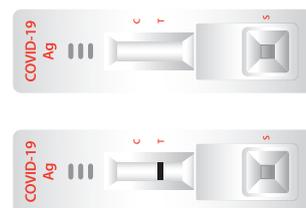

Una linea Rossa "C"

Linea Nera "T" e Linea Rossa "C"

Non appare la linea "C". Ripetere il test

